

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/maska-airfit-f40-resmed-p-157.html>

## Maska AirFit F40 Resmed



Cena	<b>439,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>64615,64614,64616,64617</b>

### Opis produktu

#### **Maska pełnotwarzowa Resmed AirFit F40**

Zaprojektowana z myślą o minimalizmie, wyposażona w innowacyjną podnosową poduszkę **AdaptiSeal**, bez twardych elementów, oraz lekką elastyczną ramkę o nowoczesnym wyglądzie. Maska zapewnia komfortowy sen dzięki skutecznemu uszczelnieniu i dopasowaniu do twarzy.

Maska AirFit F40 jest dostępna w różnych rozmiarach, aby zaspokoić potrzeby szerokiej gamy kształtów głowy i twarzy.

#### **Najważniejsze zalety maski twarzowej AirFit™ F40 to:**

- **Wygoda i komfort:** konstrukcja podnosowa AirFit™ F40 zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia czerwonych śladów na twarzy. Ponad 70% pacjentów stwierdziło, że po zastosowaniu AirFit™ F40 ślady na skórze są minimalne lub nie występują wcale
- **Duża mobilność:** maska AirFit™ F40 ma tylko cztery punkty do regulacji i magnetyczne klipsy, które błyskawicznie dopasowują uprząż do ramki, a krótki przewód i kolanko z szybkozłączką ułatwiają zdejmowanie. W niedawnym badaniu ponad 70% pacjentów mogło skutecznie dopasować maskę AirFit™ F40 bez pomocy, a 100% z nich oceniło ją jako łatwą w użyciu
- **Cicha praca:** otwór wentylacyjny QuietAir™ w modelu F40 został zaprojektowany tak, aby delikatnie rozpraszać wydychane powietrze i redukować poziom dźwięku, zapewniając ciszę i spokojny sen
- **Wygoda i komfort:** poduszka AdaptiSeal™ jest wykonana z miękkiego, elastycznego silikonu, bez twardych części, dzięki temu idealnie dopasowuje się do konturów twarzy, umożliwiając wygodne oparcie głowy na poduszce podczas snu na boku lub na plecach
- **Szerokie pole widzenia:** AirFit™ F40 to idealny wybór, jeśli nosisz okulary lub lubisz czytać podczas terapii, podnosowa konstrukcja zapewnia szerokie pole widzenia, oferując doskonałą szczelność i wydajność terapii

**Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.**

**UWAGA:** Produkt higieniczny z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar Maski:** Silikon M / Ramka (STD) Standard z Refundacją NFZ , Silikon M / Ramka (STD) Standard , Silikon SW / Ramka (STD) Standard z Refundacją NFZ , Silikon SW / Ramka (STD) Standard , Silikon L / Ramka (STD) Standard z Refundacją NFZ , Silikon M/ Ramka S z Refundacją NFZ , Silikon L / Ramka (STD) Standard , Silikon M/ Ramka S

---

## Przeciwwskazania

# Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące użytkowania maski AirFit™ F40 ResMed

Maska zawiera magnesy mogące zakłócać funkcjonowanie niektórych implantów lub urządzeń medycznych. Pełne informacje, w tym przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące magnesów, znajdują się w instrukcji użytkownika.

### Przeciwwskazania

Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają lub podczas używania maski przebywają w bliskim kontakcie fizycznym z osobami mającymi:

- Aktywne implanty medyczne, które wchodzi w interakcje z magnesami (tj. rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery defibrylatory (ICD), neurostymulatory, zastawki do przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), pompy insulinowe/infuzyjne)
- Metalowe implanty/elementy zawierające materiał ferromagnetyczny (tj. klipsy na tętniakach/urządzenia zakłócające przepływ, cewki do embolizacji, stenty, zastawki, elektrody, implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionymi magnesami, implanty oczne, metalowe odłamki w oku)

### Ostrzeżenia

Magnesy należy trzymać w bezpiecznej odległości co najmniej 150 mm od implantów lub urządzeń medycznych, na które zakłócenia magnetyczne mogą oddziaływać negatywnie. Ostrzeżenie dotyczy użytkownika maski lub osób mających z nią bliski kontakt fizyczny. Magnesy są umieszczone w ramce i dolnych zatrzaskach części nagłownej, a siła ich pola magnetycznego wynosi do 400mT. Po założeniu maski łączą się, aby ją zamocować, ale mogą się przypadkowo rozłączyć podczas snu. Implanty/urządzenia medyczne, w tym te wymienione w przeciwwskazaniach, mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zmieniają swoje funkcje pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub zawierają materiały ferromagnetyczne, które przyciągają/odpychają pola magnetyczne (niektóre implanty metalowe, np. soczewki kontaktowe z metalem, implanty dentystyczne, metalowe płytki na czaszkę, śruby, zaślepki otworów trepanacyjnych i urządzenia zastępujące kości). Należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu/innego urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na temat negatywnego wpływu pól magnetycznych.